

クリーン α

(次亜塩素酸ソーダ添加併用型) アルカリ系

特 徴

- 1 強い乳化分散力と軟水化作用によって、蛋白・油脂等の有機物を短時間に分解・除去することが出来ます。
- 2 透析液中に含まれる塩化カルシウム及び炭酸水素ナトリウムが反応して生成される炭酸カルシウムを本剤のケイ酸塩が結合してコロイド状析出物を形成し水洗と共に機外に流出させ機器へのスケール沈着を防止又は付着を大巾に軽減させる。
- 3 付着物の程度や機器使用回数の状況に対応し、任意の割合で次亜塩素酸ナトリウムとの添加濃度を調整することができ、コストダウンを図ることが出来ます。
- 4 人体及び環境面で高い安全性を有します。

組 成

- 縮合リンサン塩
- 金属イオン封鎖剤
- 珪酸塩

品質規格及び特性

外 観	無色・無臭の透明液
p ^H (1%20℃)	13.5±0.05
次亜との相溶性	任意の割合で易溶

クリーンα

使用 方 法

規定濃度に調整された薬液9リットルに対し、本剤原液1リットルを添加。

汚れ等の程度・付着具合に合わせて、本剤末端使用濃度を600ppm～2,000ppmに適宜調整して使用ください。通常侵漬または貯留接触120分～1昼夜で分解除去効果が期待できます。尚、週間使用回数については、汚れの付着程度により、毎日～週1回を目安としてください。

製 品 の 安 全 性

環 境 面	液状で水に容易に希釈されるため、その移動性により安全性が高い。
残 留 分 解 性	アルカリ性であるがイオンへの解離が大きい溶解性無機塩であり、分解が早く残留しにくい。
環境中での本液 化学物質の挙動	イオンへの解離が大きい溶解性無機塩であるため水環境への拡散後分解する。また、シリカ分は珪酸カルシウムとして沈殿されナトリウム分は食塩の溶解形で安定される。
経 口 毒 性	マウス…LD ₅₀ 1770mg/kg ラット…LD ₅₀ 2000mg/kg (本剤の安全データシート、MSDSによる)

使用 上 の 注 意

- ・本剤及び次亜塩素酸ソーダの希釈水は、必ずRO水を使用して下さい。（地下水又は水道水、工業用水を用いたりすると、珪酸カルシウムの沈殿物を析出します。）
- ・本剤及びその水溶液はアルカリ性であるため、眼や口に入らぬよう注意して下さい。万一入ったり付いたりした時は直ちによく水洗いして下さい。痛みや異常があれば医師の診察を受けて下さい。
- ・使用に際しては、ゴーグル・ゴム手袋・保護マスクを着用して下さい。（直接素手で本剤を扱ったりすると、その強い脱脂蛋白分解性で皮膚がかさかさになったり刺激を伴ったりします。）（本剤を直接河川に放流しないで下さい。）
- ・酸性物質との混合は厳禁です。

保 管 上 の 注 意

冷暗所保管

荷 姿

原液10リットル×2箱/1ケース
(リキッドタイプ)

【製造元】

株式会社 **A.N TEC**

〒521-1105 滋賀県彦根市彦富町字上柳931-5
TEL 0749-43-8017 FAX 0749-43-3021

【販売元】

有限会社 **フロンティアメディカル**

〒465-0062 名古屋市名東区松井町214番地
TEL 052-704-4705 FAX 052-704-9280

【販売代理店】