

無臭スケール除去剤

カルトン-C

[粉末タイプ]

特 徴

1

無臭性の白色粉末で透析機械に付着した炭酸カルシウムを除去します。

2

水に容易に溶け、水溶液になっても品質は非常に安定しています。

3

金属製の部品に対する腐食性は少なく、高分子材料（ゴム・プラスチック・シリコン等）には影響を与えません。

4

人体及び排水・環境面に対する安全性が非常に高い除去剤です。

5

非危険物なので、特別な保管設備等の必要がありません。

6

粉末タイプなので、保管場所が少なくてすみます。


無臭スケール
除 去 剤
[粉末タイプ]

カルトン-C

● 各濃度における溶解量

〈実験の条件〉

各濃度の薬液を1ℓ作成しビーカーに入れる。
スターラーにて持続的に攪拌している状態のところにCaCO₃を1g入れて、30分間にて完溶する量を測定した。

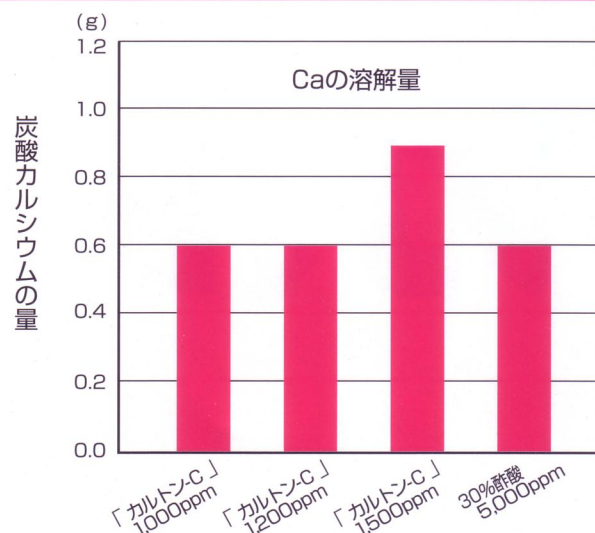

標準使用方法

- 末端使用濃度 約1,500ppm～約2,000ppm
- 酸洗浄用薬液タンクに規定量のRO水を入れ、その後本剤を全量静かに入れタンクの下部に沈殿するまでしばらく放置、その後軽く攪拌して下さい。
- 薬洗時間・方法は従来の酸洗浄方法に準じて行って下さい。
- 本剤は、作り溜めをしておいても品質には変化なく安定しています。

【一般的性質】

外 観	無臭の白色微粒結晶状粉末
p H	末端使用濃度0.12%(1,200ppm)2.2±0.05 0.20%(2,000ppm) 2±0.05
BOD	1%溶液..... 10.1ppm
COD	1%溶液..... 24.9ppm

本剤に使用している有機酸は、極めて安全で排水処理も一般の活性汚泥生物処理出来る。分解後は、無毒な水と二酸化炭素になります。

【製造元】

株式会社 **A.N TEC**

〒521-1105 滋賀県彦根市彦富町字上柳931-5
TEL 0749-43-8017 FAX 0749-43-3021

【販売元】

有限会社 **フロンティア メディカル**

〒465-0062 名古屋市名東区松井町214番地
TEL 052-704-4705 FAX 052-704-9280

使用法の注意

- 本剤と次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ性剤とは絶対に混合しないで下さい。
- 本剤又はその水溶液を扱う時は、保護メガネ・手袋を着用して下さい。
- 眼や口に入らないように注意して下さい。万一眼に入った場合は、直ちに流水で十分に洗眼し医師の適切な処置を受けて下さい。又、誤って口に入った時は、よくうがいをして医師の適切な処置を受けて下さい。
- 皮膚や衣類その他に着いた時は、よく水洗いして下さい。

【保管上の注意】

水に濡れないようにして下さい。
(水溶液になると、強酸性液となります。)

【荷姿 1ケース】

●300g×30袋入り ●500g×20袋入り ●1kg×10袋入り

【販売代理店】