

無臭性スケール除去剤

[液体タイプ]

クリーン CL

[特許申請中]

- 1 無臭性の酸性液体で透析機械に付着した炭酸カルシウムを除去します。
- 2 水溶液で品質は非常に安定しています。
- 3 金属製の部品に対する腐食性は少なく、高分子材料（ゴム・プラスチック・シリコン等）には影響をあたえません。
- 4 人体及び排水・環境面に対する安全性が非常に高い除去剤です。
- 5 非危険物なので、特別な保管設備等の必要がありません。

成分／カルボン酸化合物・アミドサルファ化合物・ジアソリン系防黴剤

特徴

従来使用されている酸洗浄用薬剤が抱える問題点（人体・下水道への排水でのBOD負荷・使用部品の各種材料等への影響及び強烈な刺激臭）をすべて解決した極めて安全な酸洗浄剤です。

無臭スケール
除去剤
[液体タイプ]


クリーンCL

本剤に使用している有機酸は、食品添加物で安全性が高く
又、分解後は、無毒な水と二酸化炭素になり
排水処理も一般の活性汚泥生物処理が出来ます。

■ 各濃度における溶解量

〈実験の条件〉

各濃度の薬液を1ℓビーカーに入れる。
スターラーにて持続的に撹拌してい
る状態のところへCaCO₃を1g入れて、
30分間にて完溶する量を測定した。

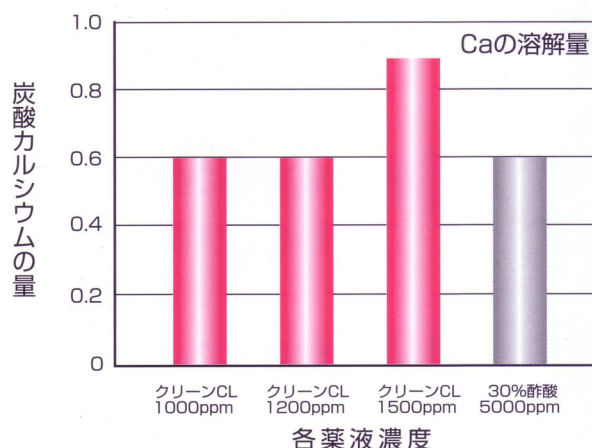

標準使用方法

- 末端使用濃度 約1,500ppm～約2,000ppm
- 酸洗浄用薬液タンクに規定量のRO水を入れ、クリーンCLを静かに入れ、撹拌して下さい。
- 薬洗時間・方法は従来の酸洗浄方法に準じて行って下さい。
- 本剤は、作り溜めをしておいても品質には変化なく安定しています。

【一般的性質】

外観	無臭の透明液体		
pH	末端使用濃度 0.2%(2,000ppm)	2.45±0.05	
	0.4%(4,000ppm)	2.35±0.05	
BOD	1%溶液.....	10.1ppm	
COD	1%溶液.....	24.9ppm	

【製造元】

株式会社 **A.N TEC**

〒521-1105 滋賀県彦根市彦富町字上柳931-5
TEL 0749-43-8017 FAX 0749-43-3021

【販売元】

有限会社 **フロンティア メディカル**

〒465-0062 名古屋市名東区松井町214番地
TEL 052-704-4705 FAX 052-704-9280

使用上の注意

- 本剤と次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ性剤とは絶対に混合しないで下さい。
- 本剤を扱う時は、保護メガネ・手袋を着用して下さい。
- 眼や口に入らないように注意して下さい。万一眼に入った場合は、直ちに流水で十分に洗眼し医師の適切な処置を受けて下さい。又、誤って口に入った時は、よくうがいをして医師の適切な処置を受けて下さい。
- 皮膚や衣類その他に付いた時は、直ちに水洗いして下さい。

【保管上の注意】

水溶液で、強酸性です。
直射日光、日なた、窓際などの所に置かないでください。

【荷姿 1ケース】

- 10ℓ 2個入り

【販売代理店】