

クローリン 60MG

主成分：塩素化イソシアヌル酸化合物

待ってました！
清潔な病院環境の**強～い**味方！

短時間で溶けて
取り扱いがカンタン！

抗菌力が強いから
芽胞菌にも効果大！

中性なので
環境にやさしい！

特 長

- 1 有効塩素量64%を有する速溶性の白色顆粒剤です。抗菌効率が
高く、低濃度で十分な効果が期待できます。
- 2 耐薬品性、耐熱性等の強い芽胞菌に対しても顕著な効果をあら
わします。
- 3 使用濃度は弱酸性～中性ですので水質に悪影響を与えません。
- 4 短時間に溶解するので取り扱いが簡単で、作業効率が向上します。
- 5 長時間貯蔵しても品質の低下はほとんどみられません。

病院環境用衛生剤 クローリン 60MG

標準使用量

対象物・対象場所	本剤使用濃度 (g/10ℓ) [濃度%]	塩素濃度ppm	接触時間
院内の床・壁・器材	5～10 [0.05～0.1]	300～600	1分
感染性のある場所	16～33 [0.16～0.33]	1000～2000	1分
厨房の床・壁・天井・作業台・トレイ	10～20 [0.1～0.2]	600～1200	1分
フキン・ダスター・手袋・白衣・タオル・リネン	5 [0.05]	300	1分
ポータブルトイレ・ストレッチャー・ワゴン車	5～10 [0.05～0.1]	300～600	1分
院内スリッパ・サンダル・シューズ	5～10 [0.05～0.1]	300～600	1分
手術後の血液濃汁のついた器具	10～20 [0.1～0.2]	600～1200	1分

使用方法

本剤の水溶液を直接散布し洗浄または、適当な濃度の溶液で処理（浸漬・洗浄・散布）してください。
なお使用頻度、汚れの度合いにより適宜増減してご使用ください。

使用上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム・高度サラシコとの直接接触・混合使用は絶対に避けてください。
（化学反応により発熱・塩素ガス発生等の危険性があります。）
- ・酸・アルカリ・他の塩素剤（二酸化塩素）・油脂類・その他化学物質および可燃物と直接触れさせないでください。
- ・皮膚や衣類についたときは払い落とすか、水洗いをしてください。
- ・火気・熱（機械室・ボイラー室等）日の当たるところを避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- ・眼・鼻・口に入らないよう注意してください。眼に入ったときは、直ちに水で充分洗眼してください。
また、誤って飲み込んだときは、卵白、牛乳を飲み、いずれの場合も医師の処置を受けてください。
- ・本剤をゴミ箱やゴミ捨て場に捨てないでください。
（生ゴミとの混合によって、塩素ガスの発生や火災の原因になります。万が一、捨てる場合は、水溶液として流してください。）
- ・溶解・希釈作業時は、マスク・ゴーグル・ゴム手袋等の着用をおすすめします。

【製造元】

株式会社 **A.N TEC**

〒521-1105 滋賀県彦根市彦富町字上柳931-5
TEL 0749-43-8017 FAX 0749-43-3021

【販売元】

有限会社 **フロンティアメディカル**

〒465-0062 名古屋市名東区松井町214番地
TEL 052-704-4705 FAX 052-704-9280

【販売代理店】