

人工透析機器外観クリーナー

AN-700

新発売！！
ノロウイルスにも有効

特 徴

- ・速効性のある消毒剤を配合しています。
- ・次亜塩素酸ナトリウムを使用していないため部材腐食性、安全性に優ります。
- ・大腸菌に対して、次亜塩素酸ナトリウムに比べて80倍の即効性があります。
- ・界面活性剤を含有しているため、汚れ落としの効果もあります。
- ・爽やかなスカッシュの香りに仕上げました。

対象となる用途

- ・人工透析器の外観清掃および消毒
- ・シーツ等、ベッド周りの消毒

香りのカスタマイズを賜ります。
レモン、ジャスミン、マグノリア、
シトラスからご指定ください。
無香料も賜ります。

使用方法

- ・本剤を機器に直接噴霧し、拭きとるかまたは、本剤を布に塗布し、塗布面で機器を拭いてください。
- ・機器に噴霧後、一定時間(15-60秒)経過後に拭き取るのが効果的です。

使用上及び保管上の注意


- ・人体に向けて噴霧しないでください。
- ・作業時には、マスク、手袋を着用してください。
- ・棚の中等、光が当たらない暗所に保管してください。

成 分

- ・塩素化イソシアヌル酸塩
- ・香料
- ・界面活性剤

消毒効果試験

- ・大腸菌に対する試験
- ・コロニー発生で赤く発色

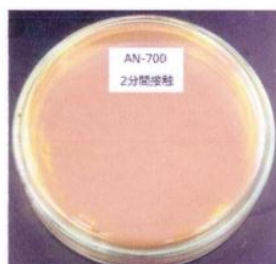

コントロールは、コロニーが発現し赤く発色。(+)
AN-700に接触させるとコロニーの発現が無い。(一)

《荷姿》

250ml × 10個/ケース

(スプレーガン付き)



【販売代理店】

【製造元】

株式会社 エー・エヌテック

〒521-1114

滋賀県彦根市彦富町字上柳931-5

TEL: 0749-43-8017

FAX: 0749-43-3021